

# Toma y procesamiento de muestras

# 4

Tubo de recogida	Procesado de muestras	Para enviar a Eurofins/Medinet
<p>Utilizando el equipo A, extraer sangre completa en BD de plástico lavanda con EDTA K2 de 6ml</p>	<p>Invertir la muestra suavemente 10 veces.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Centrifugar a 3000rpm durante 10 minutos</li><li>• Transferir al menos 2ml de plasma a los tubos de transporte con tapón verde para plasma.</li><li>• Adherir la etiqueta correspondiente.</li></ul> <p>A. LPLP – 1st collection (al tubo de transporte procedente de la primera extracción).</p> <p>O Bien</p> <p>B. LPLP – 2nd collection (al tubo de transporte procedente de la segunda extracción)</p>	<p><b>PRIMERA EXTRACCIÓN DE SANGRE</b></p> <p>A. 1 frasco de transporte de plástico con tapón verde (con la etiqueta LPLP – 1st collection)</p> <p>B. Lista de envío cumplimentada Tubo de extracción + copia azul de la lista de envío</p> <p>Envíe la muestra a temperatura ambiente el mismo día de la extracción</p> <p><b>SEGUNDA EXTRACCIÓN DE SANGRE</b></p> <p>A. 1 frasco de transporte de plástico con tapón verde (con la etiqueta LPLP – 2nd collection)</p> <p>B. Lista de envío cumplimentada Tubo de 2a extracción + copia azul de la lista de envío.</p> <p>Envíe la muestra a temperatura ambiente el mismo día de la extracción.</p>